

マスク用不織布キットの使い方

使用上の注意

マスクの大きさは折り方で調整可能

口元が固いので柔らかいもの（ティッシュ、キッチンペーパー等）を挿入
簡易的な使用に適します。

顔にフィットさせる場合は市販の包装用ワイヤーをご利用ください。

耳ゴムは繰り返しご使用下さい。

折り目が気になる場合は市販の粘着テープで止めてください。

折り目を付ける為には厚紙等で型を作って下さい。

手作りマスク用の材料

ご購入品

① A4不織布(210mm x 297mm)

② 耳ゴム(繰り返し使用)


以下任意使用材料（ご自身でご用意ください）

③ 折り目用型紙（90mm x 175mm）

④ 包装用ワイヤー

⑤ ティッシュ又はキッチンペーパー

⑥ 両面粘着テープ

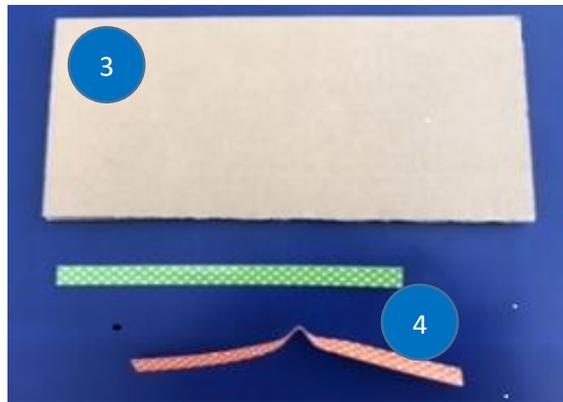

製作方法

折り方①




又は





折り方② ワイヤー挿入



折り方③ 耳ゴムの取り付け・気になる箇所を粘着テープ止めで固定

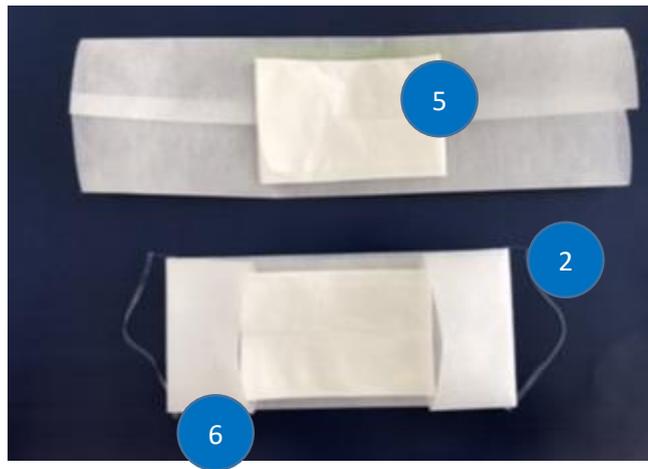

完成品

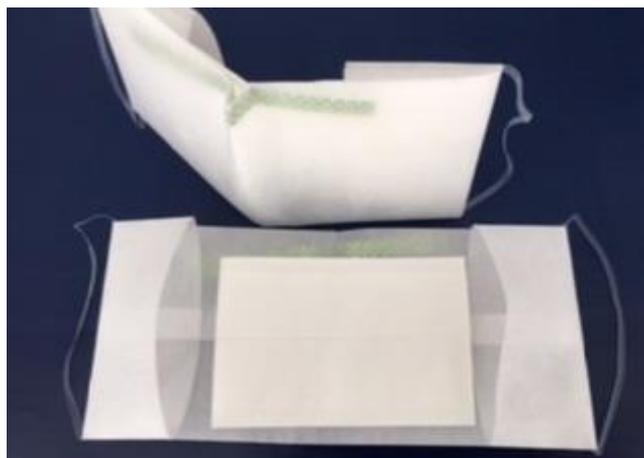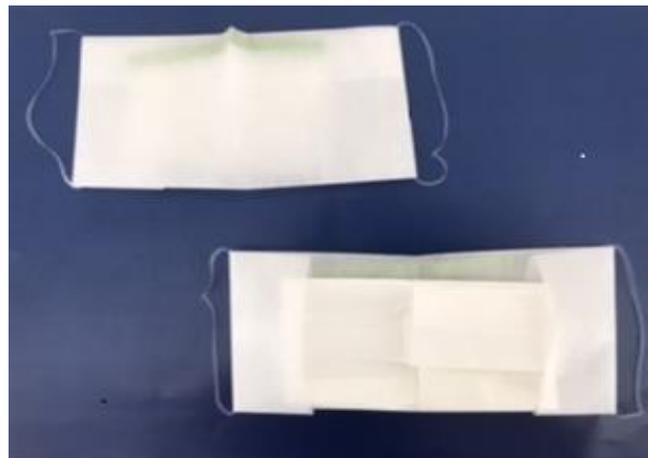

完成品（参考）お客様自身が裁縫により制作

